



HANDLEIDING RTPR004

RT ROLSTOELTECHNIEK
LINDELAUFER GEWANDE 46
6367 AZ VOERENDAAL – NL
WWW.ROLSTOELTECHNIEK.NL
INFO@ROLSTOELTECHNIEK.NL
+31 (0)45 888 54 33



Foldaway E – omkeermechaniek elektrisch bedienbaar

RTPR004



HANDLEIDING RTPR004

RT ROLSTOELTECHNIEK
LINDELAUFER GEWANDE 46
6367 AZ VOERENDAAL – NL
WWW.ROLSTOELTECHNIEK.NL
INFO@ROLSTOELTECHNIEK.NL
+31 (0)45 888 54 33

Belangrijke informatie

Hartelijk dank voor uw aankoop van ons product.

Indien u meer informatie wenst over onze producten verwijzen wij u graag naar onze website: www.rolstoeltechniek.nl

Het is belangrijk dat u de instructies doorneemt voordat u het product in gebruik neemt.

Deze handleiding kan tevens worden gedownload van onze website.

Alle foto's/schema's /tekeningen etc. in deze handleiding zijn gebaseerd op hetgeen dat beschikbaar was op het moment van drukken.

Wij behouden het recht om het product zonder voorafgaande kennis te wijzigen.

Service en ondersteuning

Indien u technische problemen ondervindt, adviseren wij u om contact op te nemen uw dealer/verstrekker. Indien nodig kunt u contact opnemen met RT Rolstoeltechniek via info@rolstoeltechniek.nl

Garantie

Onze garantievoorwaarden staan beschreven in onze algemene voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij u naar onze website.

Veiligheid

De foldaway E kan op ieder type elektrische rolstoel gemonteerd worden in een werkblad. Onjuist gebruik en verkeerde montage kan letsel veroorzaken bij de gebruiker, of schade aan de rolstoel of andere eigendommen veroorzaken.

Installeer dit product op een rolstoel als de fabrikant van de betreffende rolstoel dit toelaat.

Dit onderdeel mag uitsluitend gemonteerd en geïnstalleerd worden door een servicemonteur met voldoende kennis van zake, om de aanpassing correct uit te voeren

Indien er onduidelijkheden zijn m.b.t. bepaalde wijzigingen of aanpassingen dient u altijd contact op te nemen met uw betreffende servicemonteur.

De elektrische rolstoel dient uitgeschakeld te zijn voordat het mechaniek bediend wordt.



HANDLEIDING RTPR004

RT ROLSTOELTECHNIEK
LINDELAUFER GEWANDE 46
6367 AZ VOERENDAAL – NL
WWW.ROLSTOELTECHNIEK.NL
INFO@ROLSTOELTECHNIEK.NL
+31 (0)45 888 54 33

Om afknelgevaar te voorkomen is de Foldaway E voorzien van een slipkoppeling en om overbelasting te voorkomen is de Foldaway E intern voorzien van een zekering (5A).

Werking van de Foldaway E


De foldaway E is geschikt om het mogelijk te maken om een joystick (verschillende types, waaronder Compact van Permobil en Allround van Mo-vis) neer te klappen zodat er een vlak werkblad ontstaat.

Het neerklappen kan door een willekeurige button te bedienen die op de 3,5mm mono jack aangesloten moet worden. Zolang deze bediend wordt draait de joystick tot 90gr naar voren. Om de joystick weer in de originele positie te krijgen dient men de button nogmaals (toggle) in te drukken totdat de joystick in de rij-positie staat. Zodra de button wordt losgelaten stopt het mechaniek met draaien. Als de button vervolgens weer wordt ingedrukt draait het mechaniek de andere kant op.

Let erop dat de rolstoel altijd is uitgeschakeld tijdens het verdraaien van het mechaniek

Installatie instructies

De foldaway E is ontworpen om gemonteerd te worden in een werkblad. Er zal een gatenpatroon en een uitsparing gemaakt dienen te worden om de foldaway E optimaal te kunnen gebruiken.

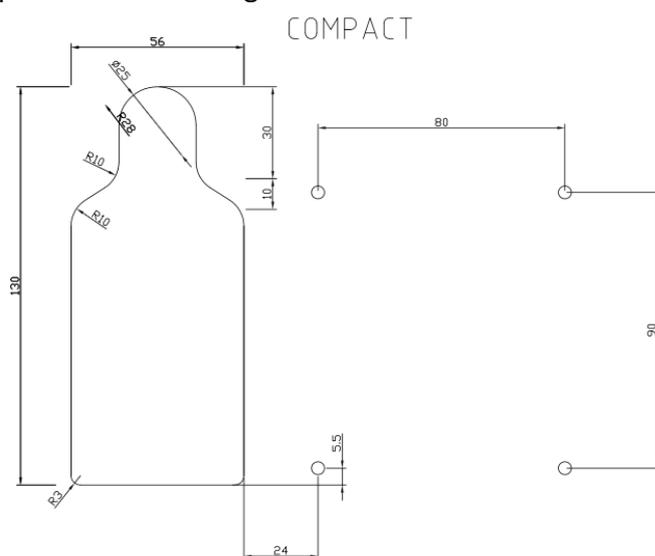

Voorbeeld compact jsm



HANDLEIDING RTPR004

RT ROLSTOELTECHNIEK
LINDELAUFER GEWANDE 46
6367 AZ VOERENDAAL – NL
WWW.ROLSTOELTECHNIEK.NL
INFO@ROLSTOELTECHNIEK.NL
+31 (0)45 888 54 33

Aansluiten van de Foldaway E

- Sluit de R-net kabel aan op het bussysteem van de rolstoel.
- Sluit een mono jack button 3,5mm aan op de aansluiting in de behuizing.
- De button wordt niet standaard meegeleverd
- Controleer de werking van de Foldaway E.
- Monteer het product in een werkblad en sluit de joystick aan.
- Universele montage beugel is geschikt voor type Compact en Allround joystick.

Problemen

Indien u problemen ondervindt met het product dient u ten alle tijden contact op te nemen met uw servicemonteur.

Reiniging & Onderhoud

Reinigen van het product kan door vuil en stof af te nemen met een licht vochtige doek.
NB! Dompel het product nooit onder in water of enorme hoeveelheden water gebruiken.
De foldaway E is onderhoudsvrij en heeft bij normaal gebruik geen onderhoud nodig.

Technische gegevens

Artikelnummer en omschrijving

- RTPR004 – Foldaway E, omkeermechaniek elektrisch bedienbaar

Materiaal

- Pom-C

Afmetingen

- 58mm x 165mm x 105mm (HxDxB)