

## Installatie handleiding S120.440 montageset Fortress/Sterling Calypso



Deze montageset wordt op een Fortress/Sterling Calypso gemonteerd. Hierdoor kunt u een Rollator- eifel- of stokhouder achterop deze scootmobiel monteren. Het is ook mogelijk de Inova stokhouder op één van de twee steunen te plaatsen. De modificatie mag alleen uitgevoerd worden door een ervaren vakman. Hier volgen aanwijzingen voor de standaard installatie.

### Benodigd gereedschap:

- steeksleutel 13mm.

### Plaatsing van de montageset

Verwijder het kiepwieltje en neem de bouten eruit. Plaats de 2 meegeleverde bouten door de twee gaten en plaats de montageplaat aan de buitenkant van de antiekiepwielbeugel. Steek de lange bout door het kiepwieltje en plaats deze in het overgebleven gat. Plaats de schroefplaat aan de andere kant, deze klemt de plaat vast. Draai alle bouten goed vast.



### E-mail ondersteuning

Als u vragen of opmerkingen heeft over het opbouwen van het montage set op deze scooter, stuur dan een e-mail naar ons met alle relevante informatie (en foto's), zodat wij u efficiënt kunnen beantwoorden.

Warmerdam Revalidatie Service vof [info@wrsnet.nl](mailto:info@wrsnet.nl)