

MONTAGEHANDLEIDING

ROLLINOVA® Zittingmontage RHI200ZM

t.b.v. stoel met 2 kokers achter de zitting



Inhoud van de doos:

1. Rollinova®buis
2. Framesteun compleet
3. Buis van de framesteun
4. Wielsteun
5. Vergrendelsteun
6. Sterknop framesteun
7. Sterknop Rollinova®buis
8. Montagebuis
9. Inbusbouten/moeren (4x)
10. Houder voor Rollinova®buis
11. Rubber t.b.v. buis 3 (2x)

Om te fixeren zijn 3 tapbouten geplaatst in de onderdelen 2,4 en 10. In onderdeel 2 is hiervoor een inwendige inbusbout geplaatst.

Montagegereedschap:

Sleutel 10 en 13 en inbussleutel 4 en 5.

Let op:

Altijd alle tapbouten zodanig losdraaien dat de Rollinova®buis (1) in de onderdelen 2,4 en 10 geplaatst kan worden bij onderstaande montage!

Volgorde van montage:

Stap 1: Monteer de houder (10) met de 4 inbusbouten en moeren (9) aan de montagebuis (8) zoals hierboven afgebeeld. Let op: de tapbout van de houder (10) moet hierbij altijd rechts zitten! Als u de montagebuis eventueel gespiegeld wilt monteren voor plaatsing in de linker koker van de scootmobiel dient de tapbout van de houder (10) ook rechts te zitten!

Stap 2: Plaats nu de montagebuis (8) in de centrale koker van de scootmobiel.

Stap 3: Schuif nu links de framesteun compleet (2) over de Rollinova®buis (1) met hierbij de sterknop van de framesteun (6) naar boven gericht en de sterknop van de Rollinova®buis (7) naar achter gericht. Deze nog niet vastzetten met de tapbout. De plaatsing van onderdeel (3) volgt pas bij de handleiding: Rollinova® Rollatorhouder afstellen op uw rollator.

Stap 4: Plaats nu de Rollinova®buis (1) in de houder (10) en laat deze ongeveer 5cm onder de houder (10) uitsteken. Zet de tapbout van de houder (10) nu een beetje vast.

Stap 5: Schuif nu, zoals afgebeeld, rechts vanaf onder de wielsteun (4) over de Rollinova®buis (1) en zet deze wielsteun (4) met de onderkant gelijk aan de Rollinova®buis (1) vast met de tapbout van de wielsteun.

De juiste afstelling van de hoogte van de Rollinova®buis (1) in de houder (10) wordt bepaald in de aparte handleiding: Rollinova® Rollatorhouder afstellen op uw rollator.

De Rollinova® Zittingmontage is nu gereed om éénmalig ingesteld te worden op uw rollator.

De juiste hoogte van de Rollinova®buis (1) in de houder (10), hoogte van de framesteun (2) en de instelling van de buis van de framesteun (3) worden beschreven in:

Rollinova® Rollatorhouder afstellen op uw rollator

Voor dit product is octrooi aangevraagd 1044157

Fabrikant Inova Revalidatietechniek Vof- Radonstraat 169- 2718SV -Zoetermeer www.rollatorhouder.nl