

# GEBRUIKSAANWIJZING

## ROLLINOVA® Rollatorhouder



**Stap 1:** Draai de onderste sterknop (zie pijl) van de framesteun los en klap de framesteun naar u toe.



**Stap 2:** Draai de onderste sterknop weer vast. U kunt de zijwaarts ingevouwen rollator gaan plaatsen op de Rollinova® Rollatorhouder.



**Stap 3:** Zet de rollator op de handrem. Til de rollator over de framesteun heen en plaats het rechter achterwiel van de rollator in de wielvanger.



**Stap 4:** Laat de rollator nu zakken met beide framebuizen op de framesteun. De rollator zit nu ook zijdelings opgesloten tegen het kunststof gedeelte van de framesteun aan (zie onderste pijl).



**Stap 5:** Draai de bovenste sterknop los. Haal de vergrendelsteun uit de houder en plaats deze vervolgens met de vergrendel pen naar u toe gericht terug in de houder. Duw de vergrendelsteun stevig naar beneden op de zitbuizen. De vergrendelpen **moet tussen beide** zitbuizen komen! Draai nu de sterknop weer vast.



**Stap 6:** De rollator is nu gereed om vervoerd te worden.



**ROLLINOVA®**  
Dé ideale rollatorhouder