




Installatie handleiding S120.455

Montagesteun rollatorhouder tbv. stoel met centrale koker.

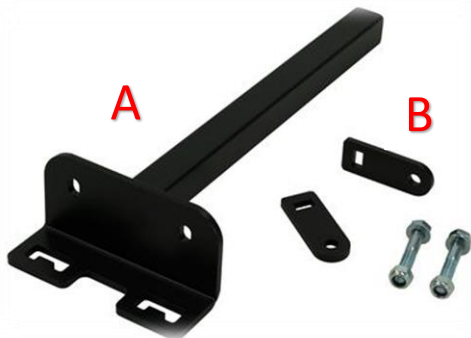

Deze montagesteun maakt het mogelijk om alle verschillende Inova rollatorhouders in de centrale koker onder de zitting van de scootmobiel te monteren. Het gaat hierbij uitsluitend om de scootmobielen welke voorzien zijn van een zitframe met centrale koker.

Hier volgen aanwijzingen voor de standaard installatie.

Benodigd gereedschap:

- Steeksleutel 13mm.

Plaatsing van de montagesteun.

Plaats de montagesteun **A** met het uiteinde 25x25mm in de koker onder de stoel zodanig dat de ronde boutgaten horizontaal komen te staan. Plaats de meegeleverde montagelippen **B** in de U vormige klemsleuven. Zie foto 1 gele pijl.

Het rechthoekige gat in de montagelippen **B** moet precies passen in de uitsparing van de montagesteun. Als deze juist geplaatst zijn komen de 8mm montagegaten in 1 lijn te liggen en kunt u de zeskantbout M8x45mm door de beide gaten steken. Draai op de uiteinde van de schroefdraad de meegeleverde M8 borgmoer (foto 1 en 2)

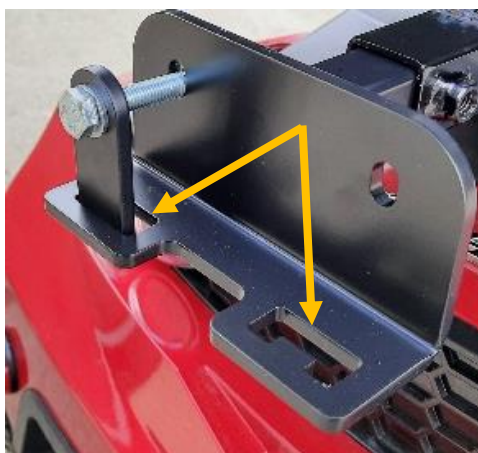


Foto 1.



Foto 2.



Nu kunt u de Rollator- of Eifelhouder tussen de montagelippen schuiven, op maat plaatsen en de bouten vast draaien. Zie foto 3.

Stel de diepte van deze houder zo af dat deze NIET tegen de bekapping van de scooter aan komt. Dit om beschadiging te voorkomen.

LET OP!!! Controleer ook of tijdens het draaien van de stoel de steun nergens tegen de kunststof bekapping aankomt. Zie foto 4.



Foto 3.



Foto 4.

E-mail ondersteuning

Als u vragen of opmerkingen heeft over het opbouwen van het montage set op deze scooter, stuur dan een e-mail naar ons met alle relevante informatie (en foto's), zodat wij u efficiënt kunnen beantwoorden.

Warmerdam Revalidatie Service vof info@wrsnet.nl