


# TROPHY - MONTAGE GASHENDEL IN HET STUUR




De gashendel is een belangrijk onderdeel in de Trophy scootmobiel. Bij het vervangen van de gashendel is het van essentieel belang de demontage en montage correct uit te voeren voor een optimaal functioneren van de Trophy. Onderstaande instructies geven de juist (de)montage handelingen.

## 1. Losdraaien van de gashendel(s), het afdekplaatje en de console

1. Ontkoppel de accu's van de elektronica van de scootmobiel
2. Schroef het bedieningspaneel los (1) met schroeven (2) en neem het af.
3. Ontkoppel de bekabeling van het bedieningspaneel (1)
4. Schroef de Tiller pcb los (3) met schroeven (4)
5. Schroef de voorkap los (5) van de stuurkolom los (4 schroefjes).
6. Verwijder de trekontlasting (tyrap) van de kabels welke bevestigd zit aan het staalwerk van de stuurkolom

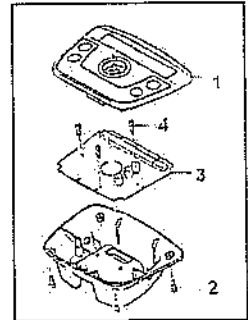


7. Draai de schroeven (6) van de gashendels/afdekplaatjes (7) los en neem ze uit. Geleid bij het uitnemen altijd, de kabel vanuit de console. Hiervoor moet de tiller pcb enigszins worden opgetild. Trek nooit aan een gashendel of de stekker. Dit kan ernstige fouten opleveren.
8. Het loskoppelen van de stekker van de gashendel vereist nauwkeurigheid. Gebruik, voor het beste resultaat, een schroevendraaier. Steek de schroevendraaier onder het voorste (langste) lipje en trek voorzichtig aan de connectoren. De connectoren komen los en de gashendel kan worden uitgenomen.

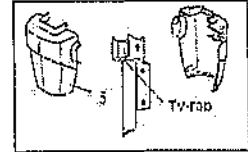


## 2. Montage van de nieuwe gashendel in het stuur

1. Monteer de schroeven (6) en meegeleverde kunststofbusjes (7). De kunststof busjes moeten aan de onderzijde van de nieuwe gashendel worden gemonteerd.

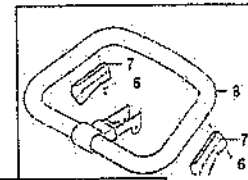

2. Sluit de connector van de gashendel aan op de connector van de stuurkabel.
3. Voer de kabel voorzichtig terug in het stuur richting de console. Geleid de kabel ook nu vanuit de console. Zorg dat de stekker in de stuurbuis ligt. De gashendel kan teruggeplaatst worden.

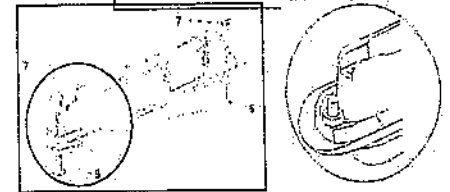

4. Monteer de gashendel (7 en 6). LET OP: Draai de schroeven aan. Stop met schroeven zodra vervorming optreedt van het zwarte stuurmateriaal. Na montage van de schroefjes moet de gashendel worden gecontroleerd op vrije beweging. Dit kan gecontroleerd worden door de gashendel vooruit en achteruit in te drukken. De gashendel moet uit zichzelf terugkomen in de middenstand. De gashendel mag niet blijven hangen! Indien de gashendel blijft hangen, draai dan de schroefjes een aantal slagen terug tot de klemming niet meer optreedt. Indien het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met de serviceafdeling van Sunrise Medical. Tel: 0492-593888



5. Monteer de tiller pcb (3 en 4) LET OP: Bij het terugplaatsen van de tiller pcb moeten stuurkabels in de uiterste hoeken van de console worden gelegd. Er mag geen kabel zichtbaar zijn door het middelste gat van de tiller pcb (Hier komt bij terugplaatsing van de console de snelheidsschakelaar te zitten)
6. Monteer het bedieningspaneel (1) weer terug op de console. Sluit hierbij de kabels weer aan. De kabel van de snelheidsschakelaar moet onder de tiller pcb worden doorgeleid.
7. Monteer de bekabelingstrekontlasting met de bijgeleverde tyrap aan de stuurkolom.
8. Monteer de voorkap (5) van de stuurkolom met de 4 schroeven
9. Koppel de accu's weer aan.
10. Zet het contact aan en test of de gashendels juist werken. Bij twijfel altijd contact opnemen met de serviceafdeling van Sunrise Medical Tel: 0492-593888